

# 体成分分析器「ioi 353s」の主な特徴・機能 (1)

## 鍼灸接骨院専用モデル、誕生。

「効果的な施術」を実施していくためには、まず施術対象者の身体について正しく理解し、肥満や筋肉不足などの解決すべき課題を把握して、施術対象者と共に施術計画や目標を策定することが何よりも重要です。

そんな「効果的な施術」を実施していくことを第一目的として開発されています。

「ioi 353s」は、多周波数測定技術により、身体を構成する筋肉量や体水分量、体脂肪量の体成分測定はもちろんのこと、腰痛や膝痛の原因である部位別の筋肉量や体脂肪量、そして内臓脂肪を測定することができます。また、筋肉量に基づく基礎代謝量を表示できますので、的確な施術に対するコンサルティングを行うことが可能です。

よって、「ioi 353s」を活用することにより、施術対象者の「課題の意識化」による改善へのモチベーション向上が期待できます。



## 軽量ポータブルタイプなので、出張もお手軽に。

「ioi353s」は、従来の据え置き型体成分分析器とは異なり、持ち運びができるよう軽量ポータブルタイプとなっており、移動に便利な専用ハードケースも標準付属しております。

よって、出張しての施術や別店舗での施術でも気軽に持ち運んで、使用することが可能となっております。



## 3周波数で高精度測定で、35秒のハイスピード。

「ioi 353s」は、5kHz、50kHz、250kHzの3周波数の電流を使用して多周波数測定を行うにより、高精度な測定を実現しております。これにより、身体を体脂肪や除脂肪、筋肉、体水分、体脂肪に分けて体成分を測定することが可能となります。

また、測定時間も35秒とハイスピードであり、貴重な施術時間を有効に活用することができます。

## 体成分分析器「ioi 353」の主な特徴・機能 (2)

### データ管理も簡単。経過グラフ出力やcsv出力も簡単！

「ioi353s」は、データ管理ソフト「BODY PASS PLUS」を標準付属しており、パソコンで簡単に測定データを保存、管理することが可能です。

また、USBメモリを使用することにより、出張先にパソコンを持って行かなくても測定データをデータ管理ソフトへ移すことも可能です。

そして、面談資料として便利な経過グラフ出力やCSVやExcelデータとして測定データを出力することも可能です。



### 立位困難な方にも配慮した、体重入力モード搭載。

「ioi353s」は、従来の体成分分析器とは異なり、立位が困難な方でも測定ができる様、体重入力モードを搭載しております。

これにより、座位のまま測定することが可能となり、車いすの方や立位が困難な高齢者の方も測定することが可能となります。

(ただし、体重を事前に測定しておく必要があります)

### 99歳の高齢者でも測定が可能に。

「ioi353s」は、測定精度を高めるために、測定対象者を5歳～89歳までの年齢の方という制限をかけておりますが、90歳以上の高齢者も測定したいという多数の要望があったことから、年齢制限設定を解除することにより、99歳まで測定することが可能となりました。これにより、元気な高齢者でも測定することができます。

### A4レーザープリンタだけではなく、サーマルプリンタでも印刷可能。

「ioi353s」は、A4レーザープリンタを使用して、対象者に体成分分析結果をより理解してもらう為に大きなA4サイズで、見やすいグラフィカルな帳票を出力できます。

また、出張先での結果紙出力に便利なサーマルプリンタでの出力も可能です。

### 全自動血圧計やライフコーダーなどの幅広い拡張性。

「ioi353s」は、血圧データや歩数、活動量なども一緒に管理できる様にする為、オーワメディカル社製の全自動血圧計やスズケン社製のライフコーダーなどの接続も可能です。これにより血圧データや活動量なども体成分分析結果と一緒に出力することができますので、より細かな施術や指導が可能になります。