

唾液・アルコールチェックキット TP-AS02




「アルコールチェックのセカンドオピニオン」
ちょっと待って！そのアルコール検知結果は
本当に正しいですか？
処分の前に、唾液で再チェック！

アルコールチェックキット TP-AS02は新しいタイプの
アルコール検知キットです。

一般的なアルコール検知器は呼気中のアルコール濃度
を測定しますが、TP-AS02は唾液中のアルコール濃度を
検知し、化学反応により血中のアルコールの有無を判
別します。

呼気式アルコール検知器の測定結果に疑義が挟まれた
時に「セカンドオピニオン」として効果を発揮します。
米国交通省 (DOT) 認定。

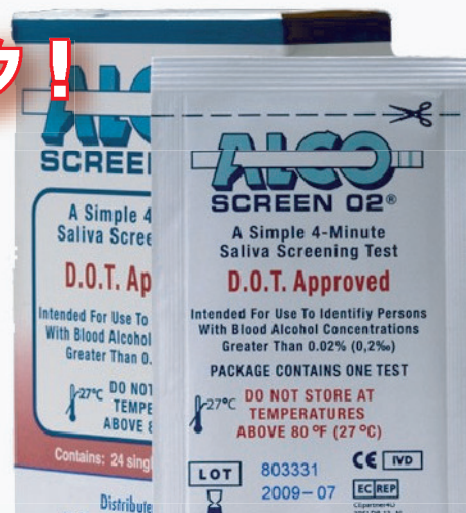

唾液
検査

飲酒
検知

DOT
認証

使用方法

- ・使用者は真水でよくうがいをしてください
- ・うがい後、15分間口腔内に何も入れない
てください
- ・キットの先端を舐めてください
- ・4分で判定、アルコール反応があれば
色が変わります
- ・測定範囲 約0.100mg/l 以上
- ・1ケース25セット入

判別方法



■総販売元

 株式会社トライプロ

TRYPRO 〒213-0013

神奈川県川崎市高津区末長676

ライフゾーン梶ヶ谷2-2

TEL:044-866-2511 FAX:050-3488-7454

E-mail:info@trypro.co.jp URL:www.trypro.co.jp