

生体情報モニタ

TM-2590

Technology You Can Trust

A&D
A&D Medical



Vital Sensor **S**

Simple

Smart

Slim

Simple
Smart
Slim



A&D 株式会社 エーアンドデー

Vital Sensor S

生体情報モニタ TM-2590「バイタルセンサS」は、3つの“**S**”をコンセプトに誕生しました。

パラメータの基本性能を強化。豊富なオプションにて様々な環境でお使いいただける生体情報モニタです。

Simple 操作はシンプル

Smart 機能は賢く

Slim 薄型・軽量コンパクト



Simple



3パラメータをより使いやすく凝縮

- 心電図 (ECG)、呼吸 (Resp)
- 非観血血圧 (NIBP)
- 動脈血酸素飽和度 (SpO2)
- 体温 (Temp)・・・サーミスタプローブオプション

360°視認性の良いパイロットランプ

アラーム、心拍・脈拍同期

ダイレクトファンクション

よく使用するスイッチは、機器上部へ配置



タッチパネルディスプレイ

人の感性に直結
見やすいLEDバックライト



医療従事者をサポートするユニークな機能を搭載
充実したオプション

A&D独自の血圧測定アルゴリズム 測定エラーの少ない、独自アルゴリズム


RPT=REPUTE搭載

(REal time PULse TriggEr レピュート)
急激な脈変動を検知し、血圧測定を開始する



血圧セーフティ表示機能


血圧値は測定後一定時間(5、10、30、60分より選択)経過
すると、古いデータとして、スリット表示に変わります。

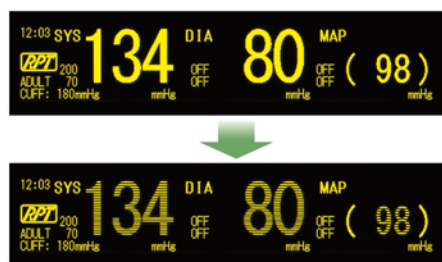

血圧測定終了時


一定時間経過後

RPP: Rate Pressure Product表示機能

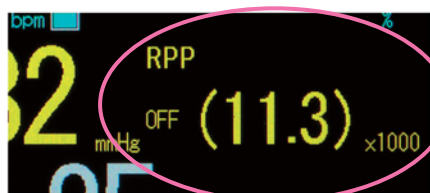

RPP
= 最高血圧値
× 脈拍数

SI: Shock Index 表示機能

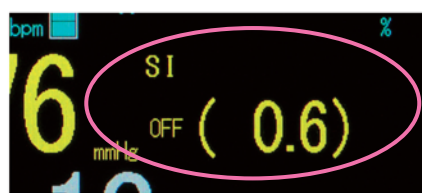


SI
(ショックインデックス)
= 心拍数(脈拍数)
/ 収縮期血圧

※ MAP(平均血圧)、RPP、SIは、機能設定により
選択表示と成ります。

自動輝度調整機能

周囲の明るさに応じて、画面バックライトを自動調整

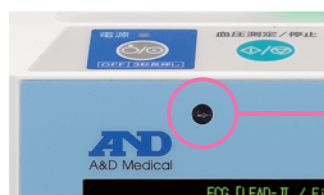

外光センサー

バッテリー駆動 2時間以上

血圧測定間隔5分時、輝度設定[2]、新品バッテリー、25℃



バッテリーユニットS
TM-2590-12
(オプション)

血圧変化追従測定終了音

インターバル測定時には、前回値と比較して、
変化が大きい場合は、音程変化でお知らせ！


| 前回測定値 | 今回測定値 | 測定終了音 |
|---------|---------|---------|
| SYS DIA | SYS DIA | |
| 134 80 | 150 93 | ピン・ポーン↑ |
| | 131 81 | ピン・ポーン→ |
| | 110 74 | ピン・ポーン↓ |

レイアウトフリー

専用架台、ワンタッチ取付金具、ストレッチャ金具など、
本体のセッティングが多彩



専用架台
TM-ST100A

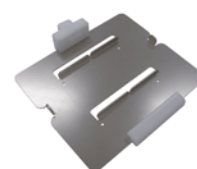

ワンタッチ取付金具S
TM-STA003




ストレッチャ金具
TM-STA005


充実したディスプレイパターン



3波形画面 ショートトレンド設定可能

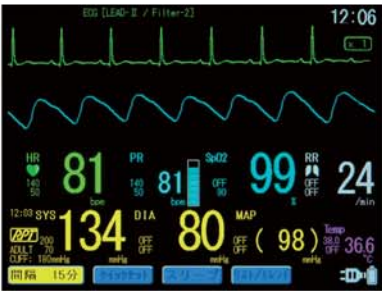


2波形画面

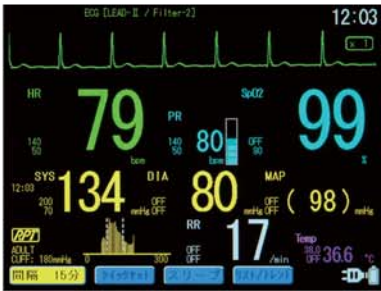

1波形数値拡大画面



リスト画面

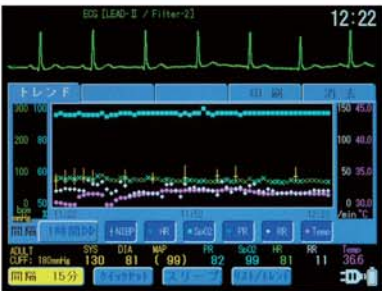

トレンド画面

システムアップ

リモートモニタ VitalStationTM-2125との組合せにより、遠隔でのモニタリングが可能となります。
通信距離は見通し約30m (但し、施設の状況により異なります。)
無線中継器を利用すれば通信距離を約2倍にすることができます。



Slim

従来品比較、奥行きを60%まで削減

重量もスリム 6.5inchディスプレイを搭載しながらも、1.9kg(クラス最軽量:自社調査による)、
従来品比較+0.5kg



30%アップ



40%ダウン

オプション ●は標準附属品



プリンタユニットS
商品コード TM2590-01
JANコード 4981046713085
¥80,000(税込価格¥84,000)



バッテリーユニットS
商品コード TM2590-12
JANコード 4981046713092
¥35,000(税込価格¥36,750)



ユニットS内部交換用バッテリー
商品コード AX-CGR-B/271
JANコード 4981046713214
¥28,000(税込価格¥29,400)



専用架台
商品コード TM-ST100A
JANコード 4981046712699
¥60,000(税込価格¥63,000)



プリンタ用紙(白紙)5巻入り
商品コード AX-PP132-S
JANコード 4981046711364
¥3,000(税込価格¥3,150)



● ACアダプタ
商品コード AX-TB246
JANコード 4981046713016
¥30,000(税込価格¥31,500)



● 電源コード
商品コード AX-KO1108
JANコード 4981046712002
¥1,000(税込価格¥1,050)



● MEラテックスフリーケーブル
アダルト 12cm
商品コード TM-CF301A
JANコード 4981046712668
¥8,000(税込価格¥8,400)



MEラテックスフリーケーブル
スモール 9cm
商品コード TM-CF201A
JANコード 4981046712651
¥9,900(税込価格¥10,395)



MEラテックスフリーケーブル
ラージ 14cm
商品コード TM-CF401A
JANコード 4981046712675
¥9,900(税込価格¥10,395)



● エアホース (1.5m)
商品コード TM9131BL-150
JANコード 4981046710268
¥4,000(税込価格¥4,200)



● エアホース (2.0m)
商品コード TM9131BL-200
JANコード 4981046710251
¥4,000(税込価格¥4,200)




● ECGケーブルS
商品コード AX-KO3503
JANコード 4571374320067
¥22,000(税込価格¥23,100)



● 3極ECGリード線
Sクリップ
商品コード AX-KO3504
JANコード 4981046713054
¥18,000(税込価格¥18,900)



3極ECGリード線
Sピン
商品コード AX-KO3505
JANコード 4981046713061
¥18,000(税込価格¥18,900)

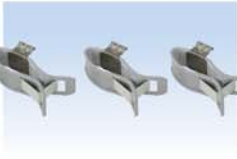

ハートクリップ 3個入り
商品コード AX-HC-03A
JANコード 4981046712378
¥10,000(税込価格¥10,500)



3Mモニタリング電極 2228
(50枚入り)
商品コード AX-ES2228
JANコード 4981046713276
¥6,000(税込価格¥6,300)



サーミスタ温度プローブ
(体表用)
商品コード AS-409J
JANコード 4571374320064
¥45,000(税込価格¥47,250)



サーミスタ温度プローブ
(成人直腸用)
商品コード AS-401J
JANコード 4571374320019
¥30,000(税込価格¥31,500)



サーミスタ温度プローブ
(小児直腸用)
商品コード AS-402J
JANコード 4571374320040
¥40,000(税込価格¥42,000)



リモートスイッチ
(デジタルスイッチ)
商品コード AX-KO2841
JANコード 4981046712170
¥8,000(税込価格¥8,400)



デュラセンサ
DS-100A
商品コード AX-SPDS-100A
JANコード 4981046710619
¥75,000(税込価格¥78,750)



● SpO2延長ケーブル 3.3m
商品コード AX-SPDOC-10
JANコード 4981046710626
¥20,000(税込価格¥21,000)



マックスファスト
商品コード AX-MAX-FAST
JANコード 4981046711296
¥235,200(税込価格¥246,960)



ネルコアオキシセンサⅢ
D-20
商品コード AX-OXIMAXD-20
JANコード 4981046712620
¥158,400(税込価格¥166,320)



ネルコアオキシセンサⅢ
D-25
商品コード AX-OXIMAXD-25
JANコード 4981046712613
¥158,400(税込価格¥166,320)



ネルコアオキシセンサⅢ
D-25L
商品コード AX-OXIMAXD-20
JANコード 4981046711289
¥158,400(税込価格¥166,320)



ネルコアオキシセンサⅢ
I-20
商品コード AX-OXIMAXI-20
JANコード 4981046712644
¥158,400(税込価格¥166,320)



ネルコアオキシセンサⅢ
N-25
商品コード AX-OXIMAXN-25
JANコード 4981046712637
¥158,400(税込価格¥166,320)



ワンタッチ取付金具S
商品コード TM-STA003
JANコード 4981046713252
¥20,000(税込価格¥21,000)



TM-2590/2125
ストレッチャ金具
商品コード TM-STA005
JANコード 4981046713399
¥15,000(税込価格¥15,750)



外部IFボード (TELE)
商品コード TM2590-03
JANコード 4981046713238
¥22,000(税込価格¥23,100)



外部IFボード (RS232C)
商品コード TM2590-02
JANコード 4981046713221
¥20,000(税込価格¥21,000)



通信ボードケーブル 2m
商品コード AX-KO3077-2000
JANコード 4981046712064
¥8,000(税込価格¥8,400)



無線ユニット
商品コード TM2140-10
JANコード 4981046700436
¥130,000(税込価格¥136,500)

仕様

| | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名 | 生体情報モニタ TM-2590 Vital Sensor S |
| 販売名 | バイタルセンサS TM-2590 |
| 種別 | 機械器具(21)内臓機能検査用器具 |
| 一般的名称 | 多項目モニタ |
| 製造承認番号 | 22300BZX00135000 |
| 医療機器の分類 | 管理医療機器、特定保守管理医療機器 |
| 表示装置 | 6.5インチTFT液晶ディスプレイ(タッチパネル式) |
| 外形寸法 | プリンタ無 : 200(W)×165(H)×95(D)mm プリンタ有(オプション): 244(W)×165(H)×95(D)mm ※外形寸法には、ゴム足、取手及び突出部は含みません |
| 質量 | 約1.9kg(本体のみ) |
| 電源定格 | AC100V-240V 50-60Hz(ACアダプタ使用時) |
| 電撃保護型式 | ACアダプタ使用時: クラスI 電池動作時: 内部電源機器 |
| EMC適合 | IEC60601-1-2:2007 |
| 商品コード | TM2590 |
| JANコード | 4981046701129 |
| 標準価格 | ¥695,000(税込価格¥729,750) |

測定項目

心電図(ECG)、呼吸(インピーダンス)、非観血血圧(NIBP)、
動脈血酸素飽和度(SpO₂)、体温(Temp)

標準構成品

本体、安定台、ACアダプタ、電源コード、ECGケーブルS、3極ECGリード線S
(クリップ)、SpO₂延長ケーブル、MEラテックスフリーカフアダルト12cm、
エアホース(1.5m、2.0m 各1本)、取扱説明書、添付文書

関連商品



リモートモニタ
バイタルステーションS

商品コード: TM2125
JANコード: 4981046701136
標準価格: ¥450,000
(税込価格¥472,500)



バイタルステーション

商品コード: TM2140W
JANコード: 4981046700412
標準価格: ¥1,280,000
(税込価格¥1,344,000)



血圧点検セットA

商品コード: TM-OP103
JANコード: 4981046700481
標準価格: ¥50,000
(税込価格¥52,500)



マイクロキャップ

商品コード: AS-OM-CS04178
JANコード: 4981046700467
標準価格: ¥700,000
(税込価格¥735,000)

定期点検サービス

あんど **and 安心サポートone** いちねん

弊社機器をお預かりし、改正医療法に適合の定期点検サービスを実施させていただきます。
詳細につきましては、弊社営業員もしくはME機器相談センターへお問い合わせください。

ME機器に関するお問い合わせは

イー・アンド・デイME機器相談センター

0120-707-188

受付時間: 月～金曜日(祝日、弊社休業日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

AND 株式会社 エー・アンド・デイ

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■名古屋営業所 TEL.052-701-5681(代) FAX.052-701-5683
■大阪営業所 TEL.06-4805-1204(代) FAX.06-4805-1201
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

製造販売業者: 株式会社イー・アンド・デイ
〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243 TEL.048-593-1434

<http://www.aandd.co.jp>

※ 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。 ※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

*TM2590-ADJC-01-PR1-11908