



驚異的な静粛性を実現した M1O2 silent 静音モデル

高酸素濃度 90%
サイレントモデル

M1O2
silent
酸素発生器

酸素濃度	90% ~ 30%
酸素流量 (毎分)	1L ~ 5L



進化した酸素発生器 M1O2



静音性能 **40dB**クラス

新・静音設計 寝室でも安心
「サイレントフォルム」を採用。

酸素濃度 **90%**(最大)

クリーンな高濃度酸素を
安定供給します。

簡単設定 **5**パターン

90%・1L ~ 30%・5L以上
までワンタッチ切替可能。

クラス最高の静音性能モデル

寝室など音が気になる場所でも安心です。

静音モーターを搭載しポンプ駆動音を大幅に抑えました。さらに共振抑制し、外部への音を遮断する新設計「サイレントフォルム」を採用しました。

新・静音設計

40dBクラス※



※40dBクラス…図書館～静かな事務所・エアコン稼働音(室内)



徹底して静音性を追求



細部にわたるまで徹底的にこだわった静音筐体。最新の静音性を高めた冷却装置やポンプユニットを採用、さらに静音化への徹底的追求の為に防振吸収パーツや防音カバーを使用したことにより驚異的な静粛性を実現しています。

美しいブルーLED操作パネル



上質感と優れた操作性を実現しました。

視認性の高いブルーLEDを採用しました。ブラックパネルに酸素濃度・流量・タイマーがブルー文字でくっきりと美しく表示されます。

アロマも楽しめる加湿ボトル



乾燥から喉をしっかり守り保湿します。

お好みでアロマを追加してアロマ酸素が吸入できます。ブルーのバックライトが優しく照らし水のゆらぎが、リラクゼーション効果を高めます。

持ち手がついて運びやすい

女性でもらくらく
軽量＆コンパクト設計


お好きな場所でいつでも
簡単に移動ができます。



各部の名称



〈 付属パーツ 〉

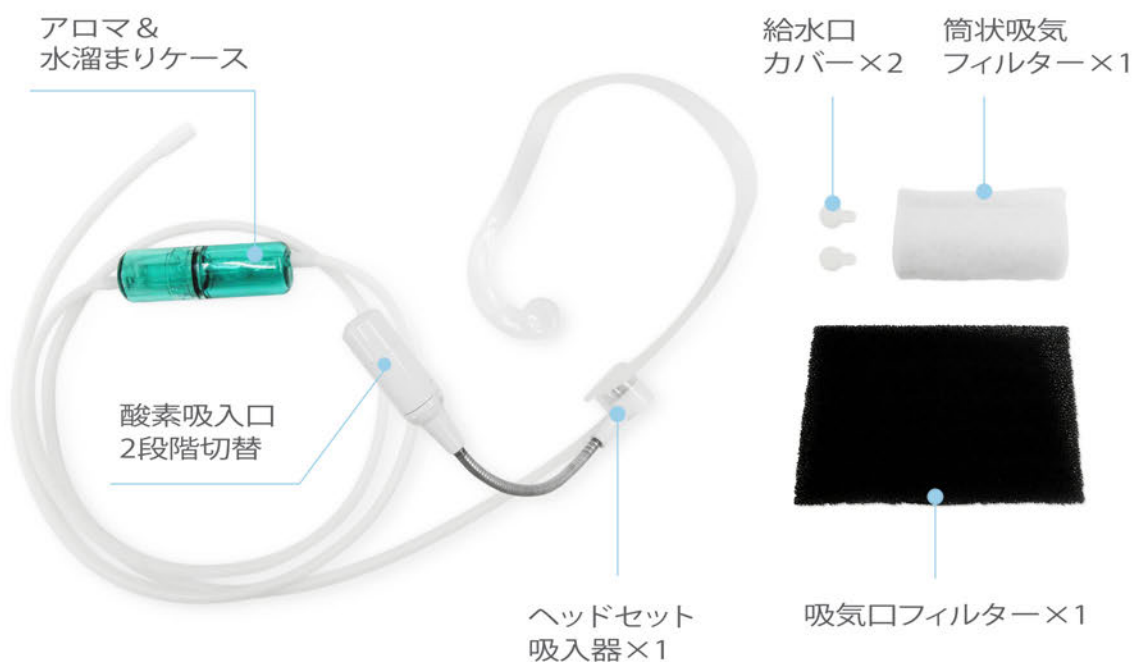

酸素発生器の基礎知識

実際に取り入れる酸素濃度は著しく低い

成人で安静時には1回に約500ml1分間/毎分、14～16回の呼吸をし1分間に約8L(毎分)の空気を吸入しています。

家庭用の酸素発生器は酸素濃度30～40%・流量2～3L/毎分です。
人間の吸入量約8L(毎分)よりも5L以上低く、吸入時には必ず周辺の空気(酸素濃度21%)と一緒に吸入しますので『実際に取り入れる酸素濃度は著しく低下』します。




重要なのは流量(勢い)と濃度のバランス

酸素流量が低い程、一緒に吸入する空気量が増えてしまいますので体に取り入れる酸素量は減り、酸素濃度は薄くなります。

一般的な家庭用酸素発生器の場合

酸素濃度30%、流量2L/分
(40%・1Lと同性能)の場合、6L/分以上の外気(酸素濃度21%)が混ざり、実際に吸入した酸素濃度は約22%となり、約1%しか上がりません。

※吸入方法や環境によって変動します。

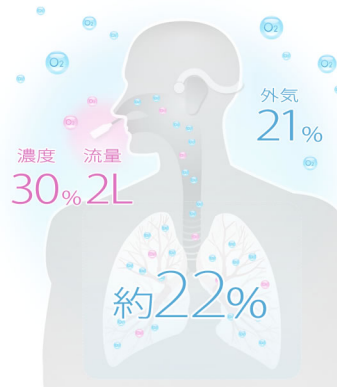


M102サイレントの場合


酸素濃度30%、流量5L/分以上
(90%・1L/分と同性能)の場合、2L/分以上の外気(酸素濃度21%)が混ざり、実際に吸入した酸素濃度は約28%となります。

※吸入方法や環境によって変動します。

使用環境や目的に応じて
1L・90%、2L、3L、4L、5L以上・30%
の5段階切り替えが出来ます。

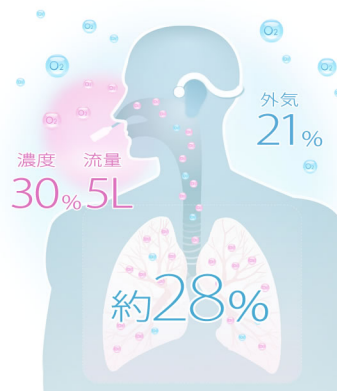

M102の推奨設定は3L～5L 設定です。

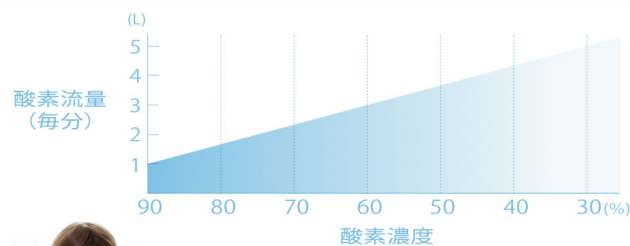

流量(勢い)があると鼻口付近が刺激となって痒い、
こぞばゆい場合は、1L又は2L設定 でご利用ください。

酸素濃度が高い(濃い)方が 効果的は間違い

高濃度だけでは判断できません。
流量調整の有る酸素発生器の殆どが
濃度が10%濃くなれば流量が約1L減り、
10%薄くなれば約1L増えます。※目安

例えば、酸素発生器の性能が濃度30%・
流量3L/分と濃度40%・2Lでは取り入れる
酸素濃度は約24%で殆ど同じです。

※ 酸素発生方式・吸入器も影響します。



しっかり吸入するには 流量 2.5L は必要

流量が1～2Lの場合は吸入方法や風・気流などの使用環境の影響などで鼻口まで届かない場合が多くなります。また周りの空気も同時に吸い込み薄くなります。
酸素吸入を体感するには最低限の酸素流量として 2.5L は必要です。

体感値の最低基準

酸素流量 **2.5L毎分** 酸素濃度 **30%以上** は必要です。

※流量 = 酸素の勢い

M1O2サイレントは

酸素流量 **5L以上** 酸素濃度 **30%**

利用目的に応じて
濃度90% 流量1Lから
5段階設定可能



< お知らせ >

弊社製品「酸素発生器M1シリーズ」の類似品・模倣品にご注意ください。

最近、M1O2シリーズの類似品・模倣品が販売されており、お客様より「異音が発生・酸素が全く出て無い」等のご相談が増えております。酸素生成不可能な製品の殆どが「ペット等の長時間連続運転・湿度混入によるゼオライト破損」が原因です。

M1O2サイレントは、日本国内の利用目的に合わせて国内の医療機器工場(医療機器の品質マネジメントシステムISO13485認証)にて静音対策・高耐久パーツに交換し、厳密にチェック管理しています。オリジナル製品として高い信頼性と安定した性能、品質を保証しています。

類似品・模倣品のメンテナンス・サポート・ご購入に関するトラブルの対応は致しかねます。

ご購入の際、M1O2シリーズとお間違いの無いよう、十分にご注意くださいますようお願い申し上げます。



総販売元：株式会社神戸メディアケア

製品仕様

製品名	M1 O2 silent (静音対策モデル)
電源	AC100V 消費電力:90W
出力酸素濃度	90%~30%(±3%)
出力流量	1~5以上 L /分
タイマー	0~120分 ※10分単位
サイズ	325(W)×200(D)×320(H)mm
重量	6.1kg
静音仕様	40dB ※使用される環境・設定により異なります。
保証期間	1年 メーカー保証
付属部品(同梱)	酸素発生器本体・酸素吸入器/ヘッドセット(水溜りボトル付き)・外気吸入フィルター×1 円柱フィルター×1・吸水キャップ×2・取扱説明書・保証書
機能	本体:加湿・アロマ・タイマー・濃度調整・流量調整吸入器:流量2段階切替(強・弱) 水吹き出し防止
備考	本製品は健康機器です。薬事法で規定した医療機器ではありません。 本製品は予告なく仕様変更される場合があります。ご了承ください。



Present

／ 今なら！ ／

**アロマオイル1本
プレゼント致します！**

(エッセンシャルオイル100%ピュア 10ml)

レモングラス

ラベンダー

ローズ



※画像はイメージです。



酸素濃度90%(最大)~30%5段階設定
静音性にこだわった高濃度酸素発生器

M1 O2 Silent
エムワンオーツースイレント
(静音対策モデル)

【定価】 **168,000円(税込)**

お問い合わせは↓
(株)神戸メディケアヘルスケア事業部 まで
TEL:0120-35-8866
FAX:078-671-5659