

新型コロナウイルスの脅威から、私たちの生活を守るために

LIVZON

新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）抗体検査試薬キット
(ラテラルフローイムノアッセイ法)

適用サンプル（全血、血清、血漿）

1分から15分で検出

IgM、IgG抗体を独立して検査可能

数百の臨床サンプルで検証済み

キットのみで判定可能、特別な装置は必要なし



新型コロナウイルス（COVID-19）の抗体を素早く簡単に検出


● 核酸検査（RT-PCR等）を補完し、新型コロナウイルスに対する抗体獲得を検出

● IgM and IgG を独立して検出することが可能であり、感染状況に合わせた使い分けが可能

● 大規模な検査に威力を発揮

● 無症状感染者の検出や回復者の確認への適用にも期待

3ステップで簡単、迅速に検査

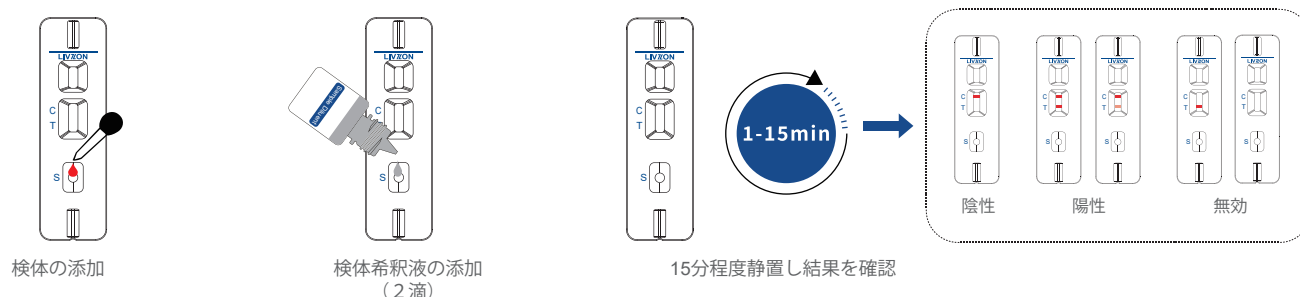

豊富な臨床での検証による優れた性能を提供

検査		臨床診断基準		合計
		感染者	非感染者	
IgM/IgG	陽性	259	3	262
	陰性	27	355	382
合計		286	358	644

IgM and IgG combined sensitivity and specificity is 90.6% and 99.2% respectively.

Total accordance rate equals 95.3%.

商品名	梱包状態	保管温度	検体のタイプと必要量
新型コロナウイルス（SARS-COV-2）抗体検査試薬キット (ラテラルフローイムノアッセイ法)	10 検査/箱, 20 検査/箱,	2-30℃	血漿、血清: 10μL 全血: 20μL