


COVID-19 IgG IgM

迅速抗体検査キット

Colloidal Gold

短時間(15分以内)で
目視で容易に判定可能

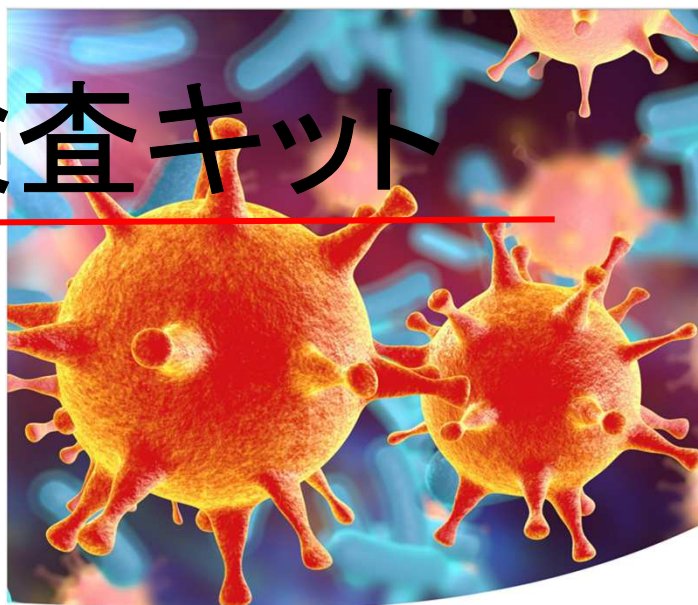

製品紹介

技術原理: 金コロイドイムノクロマト法

試験検体: 血清/血漿/全血サンプル

包装仕様: 25テスト/キット

主成分: テストカード、試料展開用緩衝液

保管温度: 2-30°C

有効期間: 12か月間(保管温度で乾燥・遮光下)

製造業者: 亿立方生物技术(中国 深圳市)

応用


COVID-19 患者の勤務先または就学先の集団内での接触者等の検査。SARS-CoV-2 / COVID-19 の疫学的調査や研究など。亜急性期や回復期の COVID-19 患者の免疫獲得状態の把握。



SHENZHEN YILIFANG

社製

SARS-CoV-2 感染後の抗体の変動

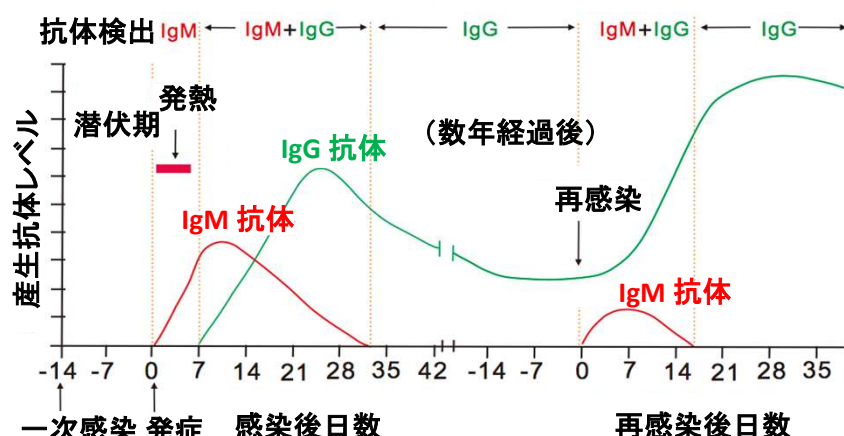

キットの内容

部 品	成 分	仕様/数
検査用カード	移動相：金コロイド標識組換え抗原及び金コロイド標識マウスIgG 固定線：マウス抗ヒトIgM モノクローナル抗体、マウス抗ヒトIgG モノクローナル抗体 及び 羊抗マウスIgG モノクローナル抗体	25 個
試料展開用緩衝液	界面活性剤入りPBS緩衝液	1 ボトル (3 ml)
ピペット (血液滴下用)	プラスチックピペット	25個
★ 採血用の器具は含まれません。		

感度及び精度

190 検体 *1 の検査結果 (メーカー発表数値)

感度 80%

精度 100%

総一致率 *2 90.53%


*1 PCR検査陽性90、陰性100

*2 (PCRと抗体検査ともに陽性及び共に陰性の合計数)/(総検体数)

操 作 法


15分以内に新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)抗体を検出します

1

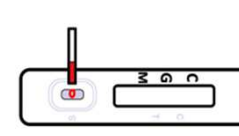

滴下穴に血清、全血、あるいは血漿を1滴(10μl)滴下する。

2

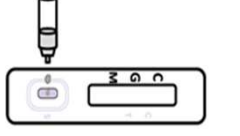

滴下穴に試料緩衝液を2-3 滴(70-100μl)加える。


3

タイマー

10分

10分間待ち、結果を眺む。注意:15分を過ぎた結果は無効。

4

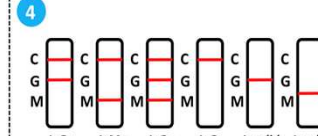

結果の解釈

Ordering Information

商品名/ 製造業者	適用 サンプル	保 管	使用期限	認 証	価 格
COVID-19 IgG IgM 迅速抗体検査キット/ 亿立方生物技术(中国)	血清、血液、血漿	乾燥条件下 2-30℃	製造日より 12ヶ月	EU基準適合	1箱/25キット入 50,000 円(1キット @2,000円) (税別/※送料無料)

- ・本製品は研究用に限定して箱単位のみで販売しております。(バラ売りは出来ません)
- ・本製品の使用により発生した損害及び損失について弊社は責任を負いません。

<販売元>

光成堂株式会社

〒540-0039 大阪市中央区東高麗橋1-12

TEL 06-6941-0232

(※光成堂(株)は光成薬品(株)のグループ会社です)