

NEW

フクビ COMMUNICATIONMASK くもり止めスプレー付き

コミュニケーションマスク

フクビのコミュニケーションマスクは口の動きや表情を伝えることができる透明マスクです。

カラーバリエーション



フィルム:透明
ひも :グレー



フィルム:透明
ひも :アイボリー



フィルム:透明
ひも :ネイビー






透明マスクのためマスクをしていても口の動きや表情を相手に伝えることができます。

長さ調整パーツで1人ひとりの顔に合った長さに調整できます。

くもり止めスプレーを使うことで、曇りにくく口元が見えます。

口との距離を適度に保ち空気がこもりにくく息苦しさが少ないです。

着用方法

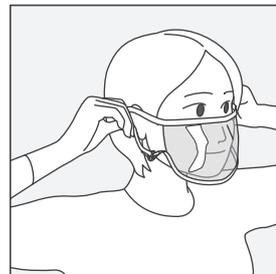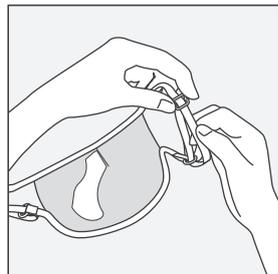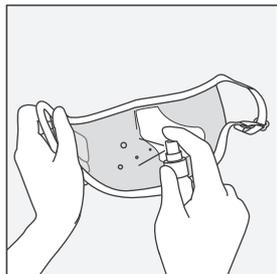

- 1 マスク内側にくもり止めをふきかけ、拭き取ります。
- 2 長さ調整パーツを上下に動かし長さを調整します。
- 3 ひもを耳にかけ最適な位置になるように微調整します。

品名、素材、希望小売価格

品名	マウスシールド(コミュニケーションマスク)
素材	フィルム: ポリプロピレン エチレン酢酸ビニル ひも: 綿 縫製系: ナイロン、ポリエステル 長さ調整パーツ: ナイロン
希望小売価格(税込)	1個入(くもり止めスプレー1本同梱): ¥2,500 3個入(くもり止めスプレー1本同梱): ¥4,980



Webサイト



Facebook



YouTube



Amazon

ご購入はフクビマスクプロジェクト Amazonストアで ↑

法人様・事業所様向け販売についても承ります。
お問い合わせ先 メール: gksgs@fukuvi.co.jp
電話: 03-5742-6321 FAX: 03-5742-6325

フクビ化学工業株式会社


〒140-8516 東京都品川区大井1-23-3

コミュニケーションマスクと一般的なマウスシールド・フェイスシールドの飛沫防止性能比較

検証内容

会話時の唾や咳や想定したコミュニケーションマスクの飛沫防止性能を確認するために検証を実施。霧吹きを使用したマネキンの口から水を噴霧させ、飛散状況を超高感度カメラで撮影しました。

マスクなし

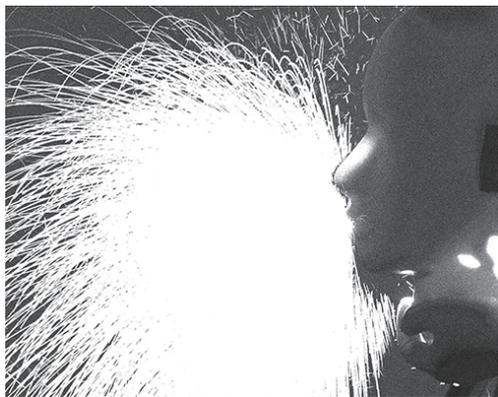

飛沫が前方に大きく飛散

コミュニケーションマスク



前方への飛散なし

マウスシールド



飛沫が前方に大きく飛散

フェイスシールド



飛沫が前方に大きく飛散

検証結果

口元が大きく開いているマウスシールド・フェイスシールドは飛沫が前方に飛散しています。

コミュニケーションマスクは前方への飛散が押さえられており、飛沫防止性能が高いことがわかります。



Webサイト



Facebook



Amazon



YouTube

詳しくはフクビマスクプロジェクト Youtubeチャンネルで ↑

法人様・事業所様向け販売についても承ります。
お問い合わせ先 メール :gksgs@fukuvi.co.jp
電話: 03-5742-6321 FAX: 03-5742-6325

フクビ化学工業株式会社

〒140-8516 東京都品川区大井1-23-3